

ÄNDERUNG IN DER BLUTKULTURDIAGNOSTIK

Umstellung der anaeroben Blutkulturflasche

LI 2326

Ab sofort werden wir die bislang verwendete anaerobe Blutkulturflasche „BD BACTEC™ **Plus Anaerobic/F**“ ersetzen.

Die **neue** BD BACTEC™ **Lytic/10 Anaerobic/F**-Flasche mit violetter Kappe enthält ein anders zusammengesetztes Nährmedium, wodurch sich die Sensitivität verbessert und sich Detektionszeiten verkürzen.

Die aerobe Flasche BD BACTEC™ **Plus Aerobic/F** mit blauer Kappe bleibt weiter in Verwendung, siehe Abbildung:



Blutkulturpaare bisher

BD BACTEC™
Plus Aerobic/F
(Kappe blau)

BD BACTEC™
Plus Anaerobic/F
(Kappe orange/gold)



Blutkulturpaare neu

BD BACTEC™
Plus Aerobic/F
(Kappe blau)

BD BACTEC™
Lytic/10 Anaerobic/F
(Kappe lila), neu

Die Handhabung bleibt unverändert. Wir empfehlen weiterhin, bis zu drei Blutkulturpaare (zur aeroben/anaeroben Anzucht) in kurzen Abständen vor Beginn der antimikrobiellen Therapie abzunehmen und einzusenden.

Das Beimpfungsverfahren mit Blut oder Punktaten ist für beide Flaschen identisch:

- Probenmenge pro Flasche 8-10 ml,
- keine Luft einbringen,
- Lagerung vor und nach dem Beimpfen bei Raumtemperatur.

Die Bestellung der neuen BD BACTEC™ **Lytic/10 Anaerobic/F**-Flasche kann nach wie vor über unser Lager bezogen werden und ist künftig unter der Art.-Nr. 442021 erhältlich. Sollten Sie noch einen Vorrat der bisher verwendeten anaeroben Blutkulturflaschen (Kappe orange/gold) haben, verbrauchen Sie ihn bitte wie bisher üblich. Im Labor können wir mit beiden Flaschenvarianten weiterhin arbeiten.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter der Telefonnummer 0335 5581-135 zur Verfügung.

Ihr Team IMD Labor Oderland