

ABSTRICH- UND TRANSPORTSYSTEME

BEZEICHNUNG	TRANSPORTMEDIUM FÜR DIE KULTURELLE ANZUCHT		„PORT“-MEDIUM	TROCKENER ABSTRICHTUPFER		COBAS® PCR MEDIA DUAL SWAB SAMPLE KIT	HPV-TRANSPORT-SYSTEM
Untersuchungs-auftrag	E + R (z. B. MRSA, MRGN, B-Streptokokken)		Helicobacter pylori	Multiplex-PCR respi- ratorischer Erreger (Viren und Bakterien) sowie Herpesviren HSV/VZV und Mumps/ Masern/Röteln	Bordetella pertussis, Bordetella parapertus- siss	Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis sowie Treponema pallidum	Humane Papillomaviren (HPV)
Methode	Mikroskopie und Kultur		Mikroskopie und Kultur	PCR	PCR	PCR	PCR
Abstrichtupfer	dünn	dick	ohne	dick	biegsam	dünn (Probennahme) / dick (reinigen) Bitte nur den dünnen Tupfer einsenden.	Bürste
Transportmedium	flüssig		halbfest	ohne	ohne	flüssig (nicht für die Kultur geeignet)	flüssig
							
Abstrichart, Untersuchungs-material	Bitte geben Sie immer den Entnahmeort an.		Biopsat Bitte Probe auf das Medium geben, nicht hinein.	Nasen-, Rachen-, Haut-, Augenabstrich	nasopharyngeal	vaginal, zervikal urethral	zervikal
Bezeichnung / Artikel-Nr.	eSwab®urethral: 80483CE	eSwab®regular: 80490CEA	42105	80552C	80553C	07958021190	5122-1220